

Perspectiva y Experiencia Clínica sobre la Eficacia y Seguridad del Equipo WonderFace para la Tonificación Muscular Facial: Una Visión desde la Medicina Estética.

Dra. Dec Barbara
Clínica DEC
Gdańsk, Polonia

Introducción

En nuestra clínica, especializada en medicina estética, hemos tenido la oportunidad de utilizar diversos dispositivos avanzados destinados a mejorar la tonificación muscular facial, la textura de la piel y lograr un rejuvenecimiento facial integral. Entre estos dispositivos, WonderFace se ha destacado gracias a su combinación única de estimulación neuromuscular y radiofrecuencia bipolar, que nos permite tratar múltiples áreas faciales simultáneamente.

Este informe detalla nuestra experiencia clínica con WonderFace, centrándose en los aspectos tecnológicos del dispositivo, los protocolos de tratamiento, los efectos secundarios observados y los resultados obtenidos.

Demografía de los Pacientes

Entre Abril y Julio, tratamos a 33 pacientes con el dispositivo WonderFace. Las características demográficas de los pacientes fueron las siguientes:

- Género: 4 hombres y 29 mujeres
- Rango de edad: 35-45 años
- Edad promedio: 40 años

Estos pacientes fueron seleccionados cuidadosamente en función de su interés en un rejuvenecimiento facial no invasivo. Cada uno de ellos presentaba preocupaciones como flacidez facial, arrugas y laxitud cutánea general, lo que los convertía en candidatos ideales para los tratamientos con WonderFace.

Descripción Tecnológica de WonderFace

El dispositivo WonderFace incorpora una combinación avanzada de estimulación neuromuscular y radiofrecuencia bipolar, que actúa sobre los músculos faciales y la piel a diferentes niveles.

Protocolo de Tratamiento

Cada paciente se sometió a una serie de 1 a 4 sesiones, dependiendo de sus necesidades específicas y resultados deseados. Los tratamientos se realizaron una vez

por semana, permitiendo una óptima recuperación muscular y regeneración tisular entre sesiones.

Todos los pacientes fueron tratados con el programa de lifting disponible en el dispositivo WonderFace, diseñado para estimular los músculos faciales, mejorar el tono y reducir la aparición de arrugas.

Áreas Tratadas

El dispositivo WonderFace es capaz de trabajar en tres áreas clave del rostro de manera simultánea:

- **Frente:** Tratando el músculo frontal para elevar las cejas y suavizar las arrugas de la frente.
- **Región Cigomática (Pómulos):** Enfocándose en los músculos cigomático mayor y menor para aumentar el volumen de las mejillas y elevar la piel flácida.
- **Área Submentoniana (Mentón y Mandíbula):** Abordando el músculo platisma para tensar la línea de la mandíbula, reducir los "bultos" y mejorar la definición del mentón.

Efectos y Beneficios

El uso del dispositivo WonderFace en nuestra clínica ha producido los siguientes beneficios para nuestros pacientes:

- **Reestructuración Muscular Facial:** La estimulación neuromuscular ayuda a reestructurar los músculos faciales, resultando en una apariencia más definida y tonificada.
- **Elevación de Mejillas y Periorbitaria:** El efecto lifting en los pómulos y la región periorbitaria contribuye a un contorno facial más juvenil y elevado.
- **Mejora de la Textura de la Piel:** La combinación de radiofrecuencia y estimulación neuromuscular mejora la textura de la piel, haciéndola más suave y refinada.
- **Tensado Cutáneo Integral:** El dispositivo tensa eficazmente la piel en todo el rostro, reduciendo la flacidez y mejorando la elasticidad general de la piel.
- **Tratamiento de la Región Submaxilar y Drenaje Linfático:** El tratamiento focalizado en la región submaxilar no solo levanta y tonifica el área, sino que también promueve el drenaje linfático, reduciendo la hinchazón y mejorando los contornos faciales.
- **Tratamiento Terapéutico de Irregularidades y Parálisis:** WonderFace ha mostrado potencial en el tratamiento de irregularidades faciales y casos leves de parálisis, ofreciendo beneficios terapéuticos más allá de la mejora estética.

Efectos Secundarios

Durante el tratamiento, observamos algunos efectos secundarios, generalmente leves pero dignos de mención:

- **Reacciones Alérgicas:** Algunos pacientes experimentaron reacciones alérgicas a la estimulación eléctrica, que se manifestaron como:
 - Hinchazón y edema
 - Urticaria en casos aislados

Estos efectos secundarios fueron transitorios y se resolvieron sin necesidad de intervención médica extensiva. No obstante, subrayan la importancia de realizar pruebas cutáneas previas al tratamiento y monitorear a los pacientes durante las sesiones.

Resultados del Tratamiento

Al concluir las sesiones de tratamiento, evaluamos los resultados basándonos en las mejoras específicas por grupo de edad en diversas regiones faciales:

- Grupo de Edad 25-35 Años:
 - **Mejora:** Los pacientes de este grupo mostraron una mejora general del 30%. Los resultados se observaron principalmente en un lifting sutil y una mejor textura de la piel.
- Grupo de Edad 35-50 Años:
 - **Mejora en el Lifting de Mejillas:** Se observó una mejora notable en el levantamiento de las mejillas, contribuyendo a un contorno facial más juvenil.
 - **Reducción de Arrugas Faciales:** Hubo una reducción significativa de arrugas faciales, especialmente alrededor de los ojos y la boca.
 - **Elevación de Cejas:** Los pacientes presentaron una elevación pronunciada en la zona de las cejas, mejorando la apariencia de la parte superior del rostro.
 - **Reducción de "Hamsters" (Papada) y Tamaño del Mentón:** Los tratamientos resultaron en una reducción de los "hamsters" (papada) y un mentón más refinado, contribuyendo a una mandíbula más definida y un adelgazamiento general del rostro.
 - **Mejora General:** En este grupo de edad, hubo una mejora del 50% en las áreas tratadas, demostrando la eficacia del dispositivo WonderFace en abordar signos de envejecimiento más pronunciados.

Conclusión

Nuestra experiencia con el dispositivo WonderFace ha sido en gran medida positiva, con evidencia clara de su efectividad en la tonificación muscular facial, rejuvenecimiento de la piel y mejora facial general. Aunque algunos pacientes experimentaron reacciones alérgicas leves, la satisfacción general y las mejoras visibles en el contorno facial y la textura de la piel destacan el valor del dispositivo en los tratamientos estéticos.

De cara al futuro, recomendamos realizar más estudios para refinar los protocolos de tratamiento y minimizar los efectos secundarios. Además, creemos que los criterios de selección de pacientes pueden optimizarse para garantizar que aquellos con piel sensible o antecedentes de reacciones alérgicas estén adecuadamente preparados y monitoreados durante el tratamiento.

Esta experiencia refuerza nuestra confianza en el potencial de dispositivos no invasivos como WonderFace para ofrecer mejoras estéticas significativas, proporcionando a los pacientes una alternativa segura y efectiva a procedimientos más invasivos. Estamos entusiasmados por continuar explorando las capacidades de WonderFace y otras tecnologías avanzadas en nuestra búsqueda de la excelencia en la medicina estética.

Declaración de Divulgación del Autor:

El estudio no fue patrocinado por Lexter Microelectronic.

El autor no ha recibido ninguna compensación económica por la realización del estudio.